

# FemCap

Contraception réutilisable  
et sans hormone




- Plus naturel et facile à utiliser
- Réutilisable pendant un an
- Protection continue pendant 48 heures
- Sûr, efficace et sans latex



[www.femcapcanada.ca](http://www.femcapcanada.ca)

## Comment le FemCap fonctionne

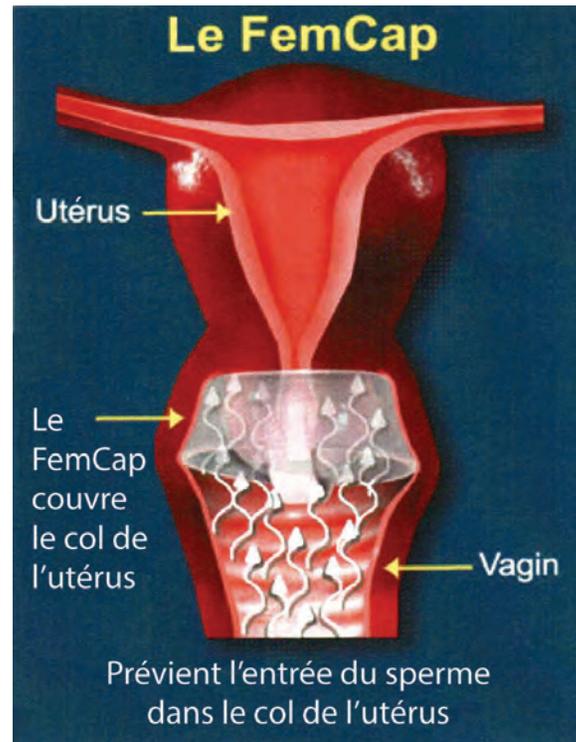

Après avoir placé le FemCap, suivez les instructions incluses avec le produit; il vous protégera et empêchera le passage du sperme dans le col de l'utérus.

## Avantages du FemCap

- Dispositif barrière de contraception sans latex
- Facile à utiliser, efficace et sans hormone
- Taux d'efficacité clinique supérieur à 92%
- Peut être en place pour une utilisation multiple jusqu'à 48 heures
- Conçu pour couvrir le col de l'utérus et empêcher le passage du sperme
- Fabriqué en silicone souple de qualité médicale
- Sans risque pour la santé, sans effet secondaire
- Réutilisable pendant un an
- N'interrompt pas le désir et ne réduit pas le plaisir sexuel des partenaires
- 3 tailles: 22mm, 26mm, 30mm

### FemCap—Trois tailles:

Petit  
22mm



Aucune  
grossesse

Moyen  
26mm



Grossesse,  
fausse-couche,  
césarienne

Grand  
30mm



Accouchement  
vaginal

# Comment utiliser le FemCap

Le FemCap peut être introduit de 15 minutes à 40 heures précédant le rapport.

1. Mettez du spermicide sur les deux côtés du FemCap.



2. Pliez le FemCap et insérez-le dans votre vagin.



3. Poussez le profondément pour placer le côté large derrière le col de l'utérus.



4. Après le rapport, attendez au moins six heures avant de retirer le FemCap. Pour l'enlever, attrapez la poignée et tirez le FemCap.



Des instructions détaillées sont incluses avec chaque FemCap.

Vidéo d'instructions au:

[www.femcapcanada.ca/femcap-use](http://www.femcapcanada.ca/femcap-use)

# Foire aux Questions

**Le FemCap peut-il se déloger durant un rapport?**

Non, le FemCap est spécialement conçu pour éviter de se déloger durant un rapport. Pour permettre différentes positions, le FemCap est conçu pour tourner.

**Comment nettoyer le FemCap?**

Le FemCap doit être lavé avec du savon antibactérien et rincé à l'eau du robinet après chaque utilisation.

**Quand faut-il remplacer le FemCap?**

Il est recommandé de le remplacer tous les ans.

**Le FemCap peut-il être utilisé durant les menstruations?**

Non, cela empêcherait l'écoulement naturel du fluide.


**Qu'en est-il des irritations dues au spermicide?**

Il est vrai que le spermicide peut causer des irritations s'il est utilisé très souvent à fortes doses. Pour minimiser cela, le FemCap est conçu avec une fente unique qui stocke le surplus de spermicide et réduit les irritations.



# Commandez le FemCap maintenant !

Tel: 1.855.246.2442

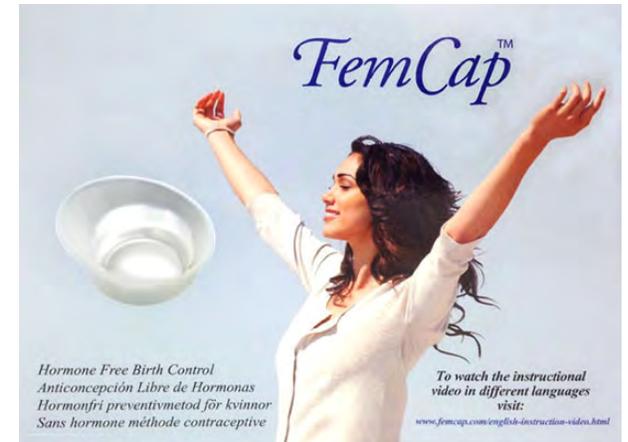

*FemCap Canada.ca*

FemCap Canada division de  
**MEDISAFE DISTRIBUTION INC.**

7 – 11771 Horseshoe Way  
Richmond, BC V7A 4V4 Canada

[www.femcapcanada.ca](http://www.femcapcanada.ca)

